

1. Zweck

Diese Arbeitsanleitung regelt die Kontrolle und Wartung des Sterilisators.

2. Abkürzungen

-

3. Geltungsbereich

Sterilisation

4. Verantwortlichkeit

Ärztliche Leitung / MPK / Leitende/r MPA

5. Durchführung

5.1 Regelmässige Kontrolle / Wartung des Klein-Dampf-Sterilisators

Vor der Benutzung des Geräts sollen folgende Kontrollen erfolgen:

Überprüfung auf Schmutz und Schäden z.B. an der Dichtung, Verschluss oder der Anzeige.

5.2 Regelmässige Überprüfung der Geräteleistung

(Eintrag ins Wartungsprotokoll des Dampf-Klein-Sterilisators)

- a. Vakuumtest 1 x wöchentlich (Montag)
- b. Bowie & Dick-Test: Nur bei regelmässiger Sterilisation von porösen Gütern (z.B. Textilien, Tupfer) nötig!

5.3 Wartungen

(Eintrag ins Wartungsprotokoll des Dampf-Klein-Sterilisators)

- a. Wechsel des Sterilbelüftungsfilters (alle 6 Monate)
- b. Wechsel der Türdichtung (nach 750 Chargen od. alle 6 Monate)
- c. Funktionsprüfung Türverschluss, Sitz Dichtung (1x pro Monat)
- d. Korrosionskontrolle (1x pro Monat)

► Unbedingt zusätzlich die Angaben des Herstellers beachten!

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Name	Häffner/Hartmann	Häffner	Hartmann
Versionsnummer	2.0		
Aktualisiert am			
Änderungsgrund			

Praxis PD Dr.med. A. Häffner	6.9 Kontrolle/Wartung	Qualitätshandbuch Seite 74 von 80
---------------------------------	-----------------------	--

6. Mitgeltende Dokumente/ Unterlagen

Formular Sterilisator Wartung

Arbeitsanweisung Wartung

7. Quelle

https://www.kantonsapotheker.ch/fileadmin/docs/public/kav/2_Leitlinien___Positionspapere/KIGAP.pdf

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Name	Häffner/Hartmann	Häffner	Hartmann
Versionsnummer	2.0		
Aktualisiert am			
Änderungsgrund			